

---


## ALLEGATO 5 - ISTRUZIONI UTILIZZO DPI (mascherina e guanti)

---

### MASCHERINE

#### COME UTILIZZARLE

1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica prima di indossare la mascherina;
2. Separare il lembo superiore da quello inferiore;
3. Tenere la mascherina con una mano con il lato aperto rivolto verso il viso. Con l'altra mano tirare gli elastici portandoli dietro la testa o le orecchie in base al modello.  
Per le mascherine di tipo chirurgico fissare i lacci a metà testa e sulla nuca.
4. Assicurandosi che la mascherina copra bene naso e bocca;
5. Con entrambe le mani modellare la parte superiore assicurandosi che aderisca bene al naso;
6. Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzata.

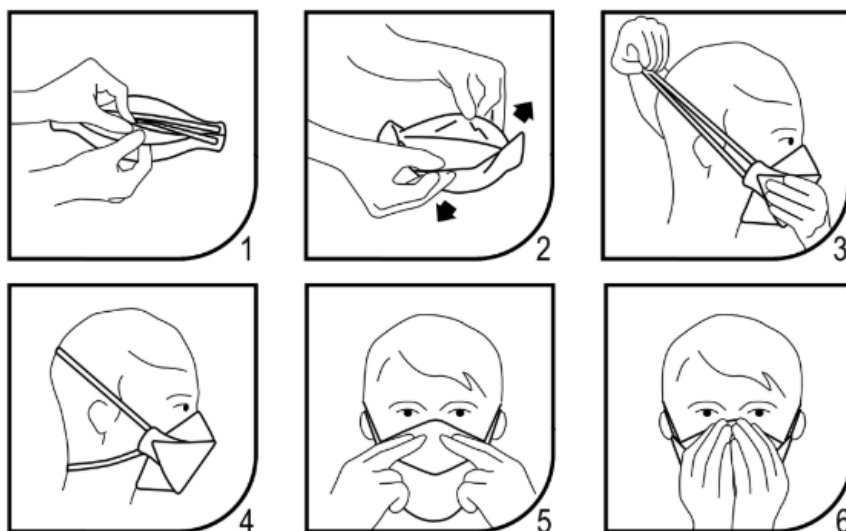

A fine utilizzo togliere la mascherina afferrando prima i lacci inferiori e poi quelli superiori, ripiegarla su sé stessa evitando di toccarla nella parte a contatto con bocca e naso (anche esterna). Dopo aver tolto la mascherina lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica.

#### CONSERVAZIONE E DURATA


Conservare le maschere secondo le istruzioni del fabbricante, preferibilmente in sacchetto chiuso in modo che non rimanga esposta a polveri o agenti contaminanti.

RACCOMANDAZIONI: l'utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Toccare la mascherina il meno possibile durante l'uso (possibilmente mai) evitando di toglierla per grattarsi naso, viso o bocca o rispondere al telefono.

## GUANTI

### COME UTILIZZARLI

- Indossare i guanti:
  1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica prima di indossare i guanti;
  2. Indossare i guanti fino a coprire i polsi;
- Togliere i guanti
  3. La parte esterna dei guanti è contaminata. Afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo;
  4. Tenere il guanto rimosso nella mano guantata, successivamente infilare il dito della mano senza guanto sotto il polsino del guanto facendo attenzione a non venire a contatto con la superficie del palmo della mano guantata. Sfilare il guanto incorporando il primo guanto in un unico involucro.
  5. Eliminare i guanti contaminati in appositi contenitori.

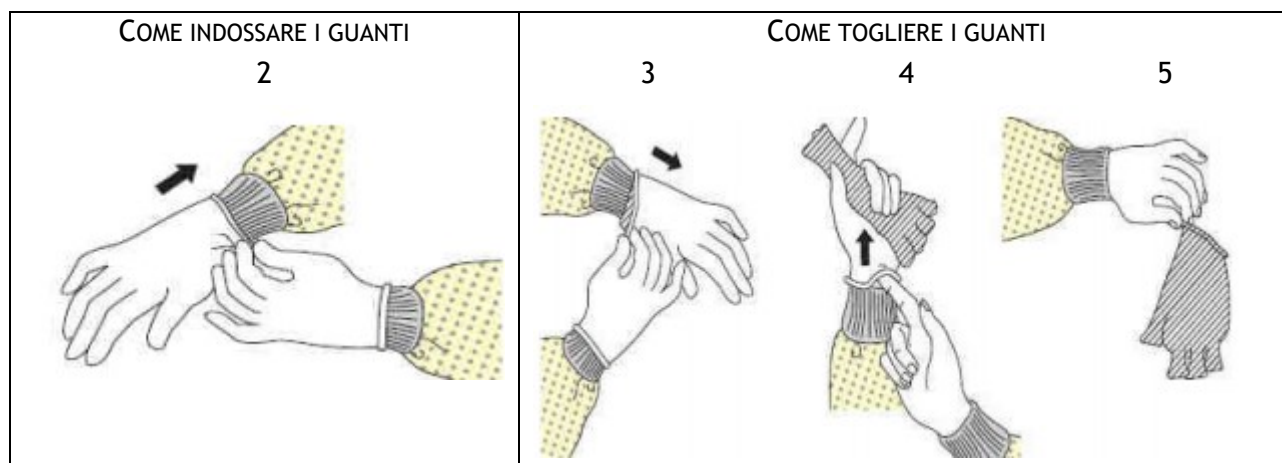

### CONSERVAZIONE E DURATA

La durata dei guanti dipende dall'uso che ne viene fatto, in caso di necessità di sostituzione degli stessi rivolgersi al proprio responsabile.

### RACCOMANDAZIONI

L'utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Non toccare con i guanti naso, occhi e bocca, strumenti di uso comune come cellulare, penne, occhiali, ecc.